

ความสามารถ

- ❖ ช่วงการชั่งน้ำหนัก 3-200kg ค่าละเอียด 0.05kg
- ❖ ช่วงการวัดส่วนสูง 135-210cm ค่าละเอียด 0.5cm
- ❖ ฟังก์ชันเสียงแนะนำการใช้งาน
- ❖ สามารถวัด ส่วนสูง น้ำหนัก ไขมัน น้ำ กล้ามเนื้อ มวลกระดูก แคลอรี่ BMI สัดส่วนรูปร่าง
- ❖ วัดส่วนสูงด้วยอัลตราโซนิก
- ❖ พร้อมเครื่องพิมพ์รายงานการวัด
- ❖ หน่วยน้ำหนัก : kg/lb

ตั้งค่า เพศ และ อายุ

- ❖ กด ■ จะเข้าสู่การตั้งค่าโหมดการทำงานใช้ปุ่ม ▼▲ ในการเลือก ให้เลือกเป็น   (หากเลือกเป็น  จะวัดเฉพาะส่วนสูงและน้ำหนัก ไม่วัดค่าอื่นๆ) และกด ■ เพื่อยืนยัน
- ❖ จากนั้นเลือกเพศโดยใช้ปุ่ม ▼▲ ในการเลือก ภาพ  หรือ  จะกระพริบ และกด ■ เพื่อยืนยัน
- ❖ จากนั้นเลือกอายุโดยใช้ปุ่ม ▼▲ เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข และกด ■ เพื่อยืนยัน

ขั้นตอนการใช้งาน

- ❖ ดำเนินการตามเสียงพูด 3 ขั้นตอนดังนี้
- ❖ ยืนบนแท่นชั่งเพื่อชั่งน้ำหนัก
- ❖ จากนั้นให้ยืนตรงเพื่อวัดส่วนสูง
- ❖ จากนั้นวางมือทั้งสองข้างบนแผ่นโลหะด้านข้างเพื่อวัดค่าอื่นๆ

ข้อความเตือนความผิดพลาด

- ❖ ถ้าน้ำหนักมากกว่า 200kg หน้าจอจะแสดง 
- ❖ ถ้าส่วนสูงมากกว่า 210cm หน้าจอจะแสดง 

คำแนะนำการใช้งาน


- ❖ วางเครื่องบนพื้นเรียบและมั่นคงก่อนการใช้งาน
- ❖ ใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ชื้น หรือร้อนเกินไป
- ❖ ควรใช้งานในช่วงอุณหภูมิไม่เกิน 0-45 °C
- ❖ ถ้าไม่ใช้งานเป็นเวลานาน กรุณาปิดสวิตช์ เปิด/ปิด ที่ฐาน
- ❖ หลังจากพิมพ์รายงานการวัด หากไม่มีการดำเนินการใดๆ 15 วินาที เครื่องจะกลับสู่สถานะการชั่งน้ำหนัก



เครื่องชั่งน้ำหนัก


และ

วัดส่วนสูง

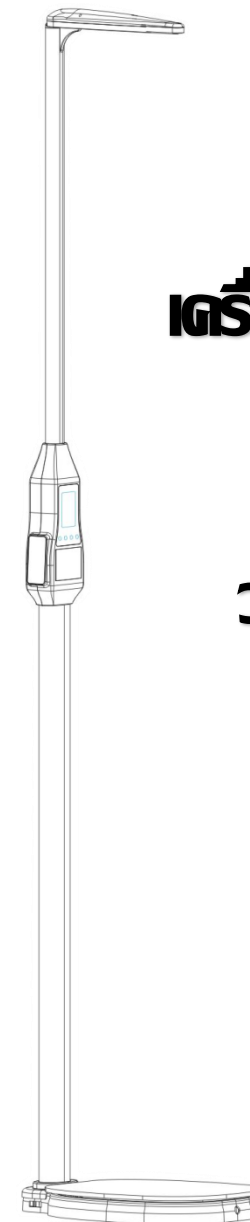


Tiger

แผนภาพการติดตั้ง

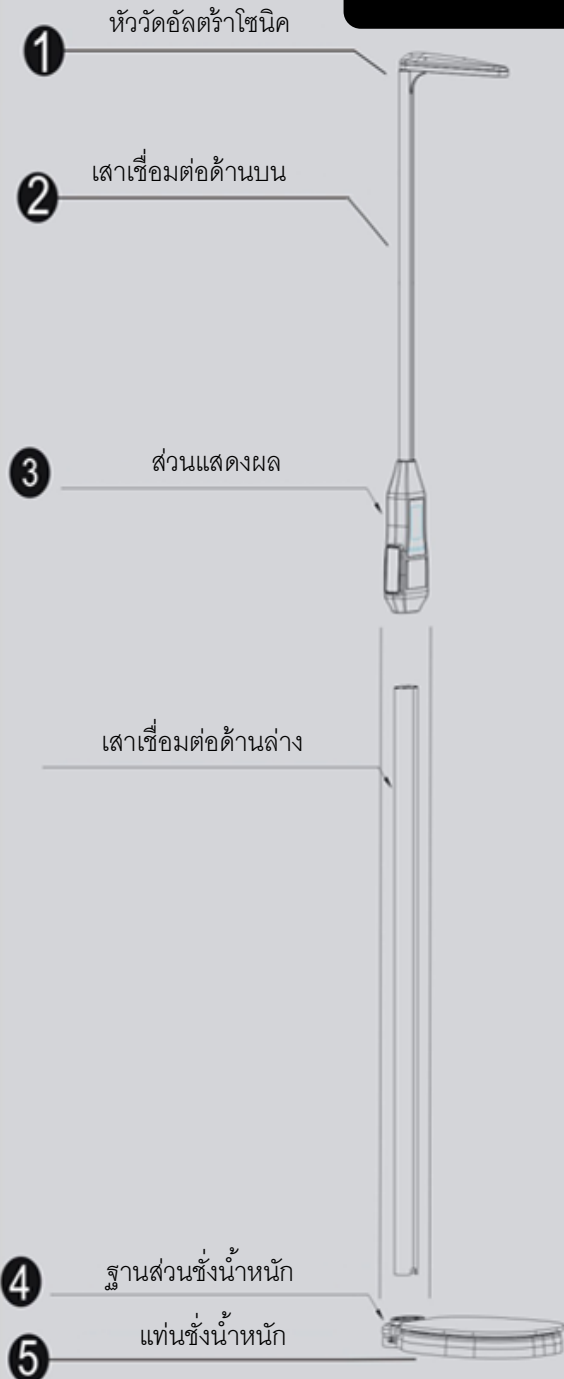

แผนภาพการติดตั้ง

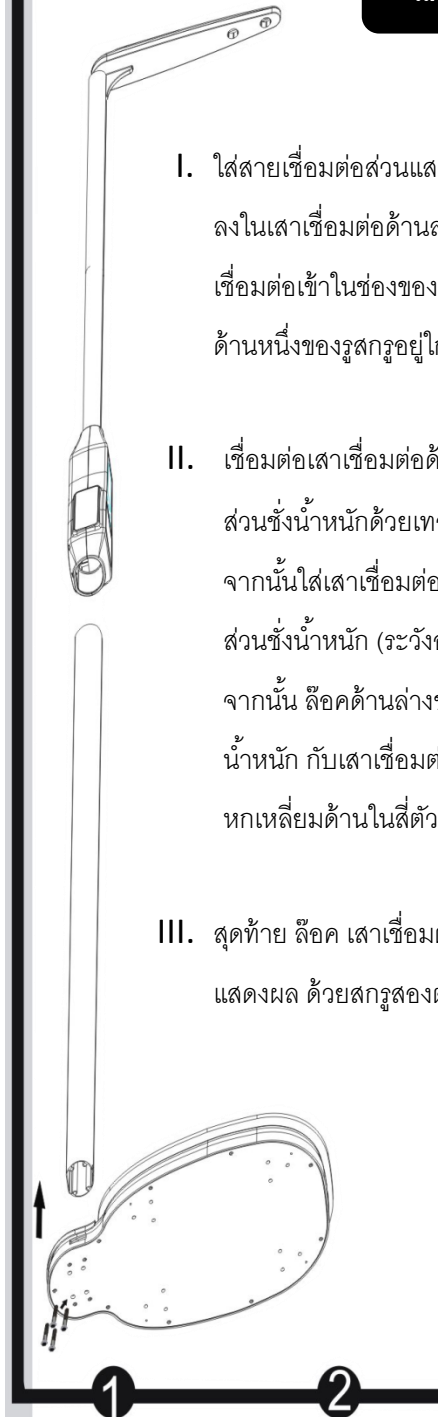

โครงสร้างการทำงาน

โหมดการทำงาน

ค่าเริ่มต้นจะเป็นโหมด วัด ส่วนสูง/น้ำหนัก □

กด ■ เพื่อเข้าสู่การเลือกโหมดการทำงาน ใช้ปุ่ม

▼▲ ในการเลือก

■ คือโหมดวัด ส่วนสูง□น้ำหนัก□ไขมัน

□น้ำ□กล้ามเนื้อ□มวลกระดูก□แคลอรี

□BMI□สัดส่วนรูปร่าง

■ คือโหมดวัด ส่วนสูง/น้ำหนัก

ปุ่มเสียงพูดและพิมพ์รายงาน

กดปุ่ม ▲ เพื่อ เปิด/ปิด เสียงพูด

หลังจากจบกระบวนการวัดค่าต่างๆ กดปุ่ม ■

เพื่อส่งพิมพ์ รายงานผลการวัด

