

คู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย

Ver.DGS-TBC01P-01

TBC-01P SERIES

HEIGHT & WEIGHT SCALE



Tiger

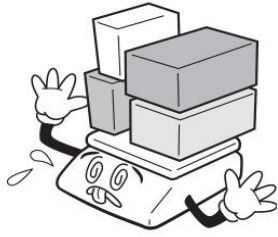
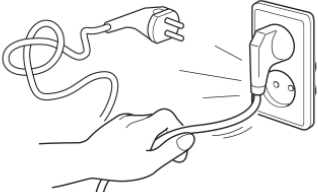
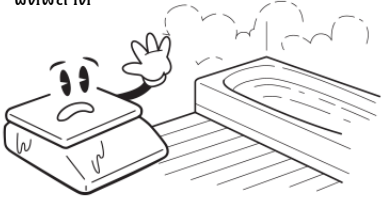
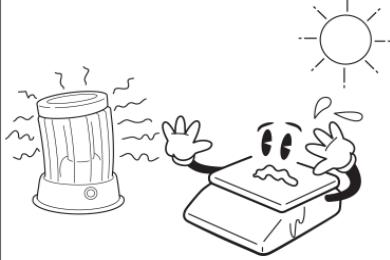
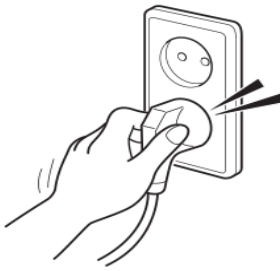


สารบัญ

1. ข้อควรระวัง	2
2. การประกอบ และติดตั้ง	4
3. ความสามารถ	5
4. การตั้งค่า และการใช้งาน	6
4.1. ตั้งค่าโหมดการทำงาน เพศ และอายุ	6
4.2. เปลี่ยนหน่วยน้ำหนัก	6
4.3. เสียงพูด	6
4.4. การใช้งาน	6
4.5. พิมพ์รายงาน	6
5. คำแนะนำการใช้งาน	7
6. ข้อความเตือนความผิดพลาด	7

1. ข้อควรระวัง

ข้อควรระวังในการติดตั้งเครื่องชั่ง เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องชั่งจะทำงานได้ดีที่สุด กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

ห้าม! ถอดแยกส่วนประกอบของเครื่องชั่ง หากเกิดการชำรุดเสียหายกรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่ายเพื่อให้ได้รับการซ่อมบำรุงอย่างถูกวิธี 	ห้าม! วางน้ำหนักบนแท่นชั่งมากกว่าพิกัดสูงสุดของเครื่องชั่ง 	ควร! ต่อสายกราวเพื่อให้อิทธิพลไฟฟ้าคงที่ การต่อสายกราวจะช่วยลดปัญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไม่คงที่ หรือการถูกไฟช็อต 
ห้าม! ถอดปลั๊กโดยดึงที่สายไฟ แรงดึงที่สายอาจทำให้เกิดไฟช็อต หรือไฟไหม้ 	ห้าม! ติดตั้ง หรือใช้งานเครื่องชั่งใกล้กับ วัตถุไวไฟ หรือก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน 	ห้าม! ทำน้ำหกใส่เครื่องชั่ง หรือติดตั้งในสถานที่ที่มีความชื้นสูง เพื่อป้องกันไฟช็อต หรือการอ่านค่าผิดพลาด 
หลีกเลี่ยง! การติดตั้งเครื่องชั่งใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน หรือ โคมแสงแดดโดยตรง 	เสียบปลั๊กให้แน่นกับเต้ารับบนผนังเพื่อป้องกันไฟช็อต 	ใช้! Adaptor ที่เหมาะสมกับเครื่องชั่ง Adaptor ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เครื่องชั่งเสียหายได้ 

ข้อควรระวัง



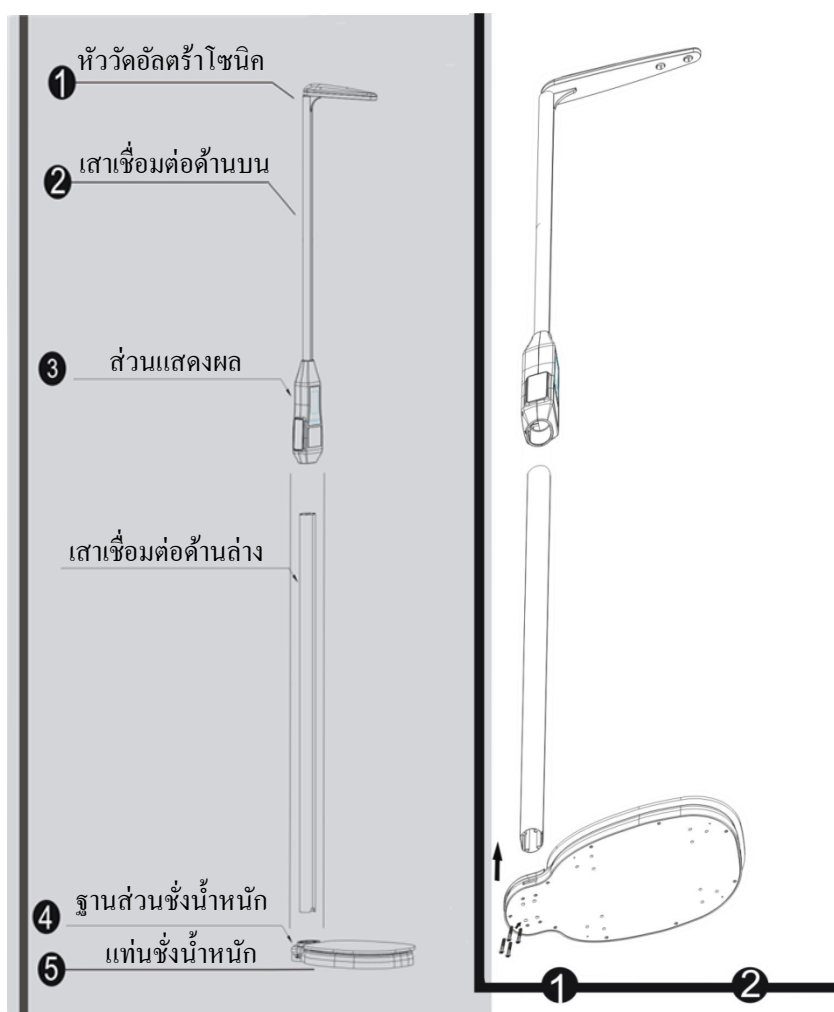
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้งานกับกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม และเพื่อให้เครื่องทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้ 30 นาทีก่อนใช้งานเพื่อเป็นการวอร์มเครื่อง

เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ เครื่องชั่งควรได้รับการปรับแต่งโดยผู้แทนจำหน่ายเป็นประจำ	หลีกเลี่ยง! แรงกระแทกที่เกิดกับเครื่องชั่ง เช่นการโยนของ	ขณะเคลื่อนย้ายให้จับที่ตัวเครื่องชั่ง ห้ามจับที่จานชั่ง
เก็บเครื่องชั่งให้ห่างไกลจากอุปกรณ์ที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	สถานที่ติดตั้ง ควรมั่นคง มีอุณหภูมิ และสภาวะแวดล้อมที่	ปรับระดับของเครื่องโดยการปรับที่ขาปรับทั้ง 4 ให้ฟองอากาศอยู่ที่กลางตัววัดระดับ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าอาจรบกวนการแสดงผลที่ถูกต้อง		
นำแบตเตอรี่ออกจากเครื่องชั่งเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน เพราะการรั่วไหลของแบตเตอรี่เป็นอันตราย		

- กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ ตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของเครื่องชั่ง
- หากพบความเสียหายที่อุปกรณ์เชื่อมต่อ หรือสายไฟ กรุณาปิดเครื่อง และนำทั้งหมดไปไว้ในที่ปลอดภัย และห้ามใช้งานจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซม
- เครื่องชั่งนี้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เหมาะสมเท่านั้น เราไม่รับผิดชอบต่อการดัดแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับเครื่องชั่ง รวมถึงการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อและสายไฟที่ไม่ได้รับจากเรา อย่างไรก็ตาม เราพร้อมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการใช้งานเสมอ
- หากเครื่องชั่งไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่ายของท่าน

2. การประกอบ และติดตั้งเครื่องชั่ง

ประกอบเครื่องตามขั้นตอนด้านล่าง



- 1) ใส่สายเชื่อมต่อส่วนแสดงผล 4p และ 2p ลงในเสาเชื่อมต่อด้านล่าง จากนั้นใส่เสาเชื่อมต่อเข้าในช่องของส่วนแสดงผล (ปลายด้านหนึ่งของรูสกรูอยู่ใกล้ส่วนแสดงผล)
- 2) เชื่อมต่อเสาเชื่อมต่อด้านล่างเข้ากับฐานส่วนซึ่งน้ำหนักด้วยเทอร์มินัล 4p และ 2p จากนั้นใส่เสาเชื่อมต่อด้านล่างเข้ากับฐานส่วนซึ่งน้ำหนัก (ระวังอย่าให้กดทับสาย) จากนั้น ล็อคด้านล่างของฐานส่วนซึ่งน้ำหนัก กับเสาเชื่อมต่อด้านล่างด้วยสกรูหกเหลี่ยมด้านในสี่ตัว
- 3) สุดท้าย ล็อค เสาเชื่อมต่อด้านล่าง กับส่วนแสดงผล ด้วยสกรูสองตัวด้านหลัง

เพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้องแม่นยำของการใช้งานอย่าใช้เครื่องมือในสถานที่หรือเมื่อสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนสูง และสภาวะแวดล้อมไม่ควรเกินค่าเกินกว่าที่ระบุไว้ใน Specifications

3. ความสามารถ

- ช่วงการชั่งน้ำหนัก $\square$ 3-200kg $\square$ ค่าละเอียดอ่าน $\square$ 0.05kg
- ช่วงการวัดส่วนสูง $\square$ 135-210kg $\square$ ค่าละเอียดอ่าน $\square$ 0.5cm
- ฟังก์ชันเสียงแนะนำการใช้งาน
- สามารถวัด ส่วนสูง $\square$ น้ำหนัก $\square$ ไขมัน $\square$ น้ำ $\square$ กล้ามเนื้อ $\square$ มวลกระดูก $\square$ แคลอรี $\square$ BMI $\square$ สัดส่วนรูปร่าง
- วัดส่วนสูงด้วยอัลตราโซนิก
- พร้อมเครื่องพิมพ์รายงานการวัด
- หน่วยน้ำหนัก : kg/lb

4. การตั้งค่า และการใช้งาน

4.1. การตั้งค่า โหมดการทำงาน เพศ และ อายุ

ค่าเริ่มต้นจะเป็นโหมด วัด ส่วนสูง/น้ำหนัก

- กด  เพื่อเข้าสู่การเลือกโหมดการทำงาน ใช้ปุ่ม ,  ในการเลือก
  คือ โหมดวัด ส่วนสูง  น้ำหนัก  ไขมัน  น้ำ  กล้ามเนื้อ  มวลกระดูก  แคลอรี  BMI  สัดส่วน
 คือ โหมดวัด ส่วนสูง/น้ำหนัก
- จากนั้นเลือกเพศโดยใช้ปุ่ม ,  ในการเลือก ตั้งเกตุภาพ  หรือ  จะกระพริบ พร้อมทั้งมีเสียงพูด และกด  เพื่อยืนยัน
- จากนั้นเลือกอายุโดยใช้ปุ่ม ,  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข และกด  เพื่อยืนยัน และกลับไปยังสถานะรอการชั่งน้ำหนัก

4.2. เปลี่ยนหน่วยน้ำหนัก

ค่าเริ่มต้นจะเป็นหน่วย kg สามารถเปลี่ยนหน่วยได้โดย ขณะอยู่ในสถานะรอการชั่งน้ำหนัก กดปุ่ม  ซึ่งจะเปลี่ยนระหว่าง หน่วย kg หรือ lb

4.3. เสียงพูด

ขณะอยู่ในสถานะรอการชั่งน้ำหนัก กดปุ่ม  เพื่อ เปิด/ปิด โหมดเสียงพูด

4.4. การใช้งาน

หลังจากการตั้งค่าตามข้อ 4.1 ใช้งานโดยขึ้นบนแท่นชั่ง และดำเนินการตามเสียงพูด 3 ขั้นตอนดังนี้

- ขึ้นยืนนิ่งบนแท่นชั่งเพื่อชั่งน้ำหนัก
- จากนั้นให้ขึ้นตรงเพื่อวัดส่วนสูง
- จากนั้นวางมือทั้งสองข้างบนแผ่นโลหะด้านข้างเพื่อวัดค่าอื่นๆ

4.5. พิมพ์รายงาน

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการวัดค่าต่างๆ กดปุ่ม  เพื่อสั่งพิมพ์ รายงานผลการวัด

5. คำแนะนำการใช้งาน

- วางเครื่องบนพื้นที่เรียบและมั่นคงก่อนการใช้งาน
- ใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ชื้น หรือร้อนเกินไป
- ควรใช้งานในช่วงอุณหภูมิไม่เกิน 0-45 °C
- ถ้าไม่ใช้งานเป็นเวลานาน กรุณาปิดสวิตช์ เปิด/ปิด ที่ฐาน
- หลังจากพิมพ์รายงานการวัด หากไม่มีการดำเนินการใดๆ 15 วินาที เครื่องจะกลับสู่สถานะรอการชั่งน้ำหนัก

6. ข้อความเตือนความผิดพลาด

- ถ้าน้ำหนักมากกว่า 200kg หน้าจอจะแสดง 
- ถ้าส่วนสูงมากกว่า 210cm หน้าจอจะแสดง 